




Kurzbedienungs- anleitung

Dies ist eine verkürzte Bedienungsanleitung der Lantus®- und Apidra®-Pens und darf nur in Verbindung mit einer Lantus®- oder Apidra®-Verordnung an Patienten abgegeben werden


SoloSTAR® zum Kennenlernen

SoloSTAR® ist ein Fertipen für die Insulininjektion.
Mit SoloSTAR® lassen sich bis zu 80 Einheiten in 1er-Schritten einstellen.


Penkappe

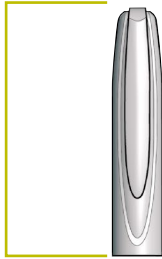

Pennadel
(nicht im
Lieferumfang
enthalten)

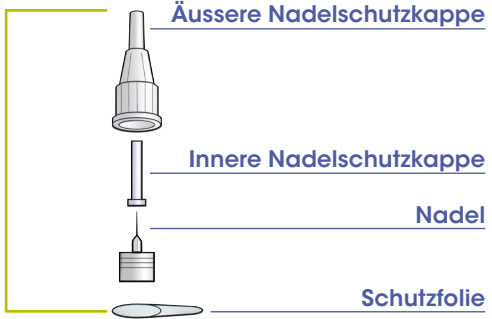

Pengehäuse

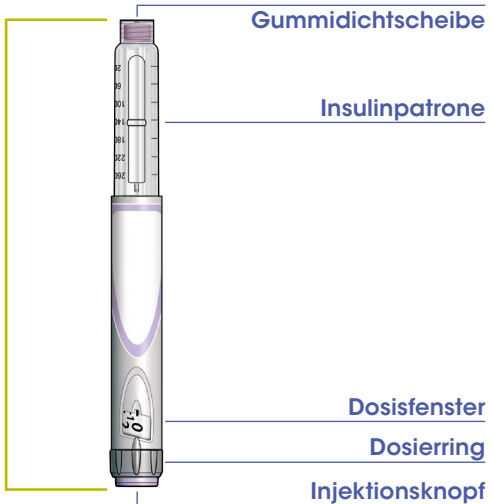


Die Patrone ist nicht austauschbar.



Bitte vergewissern Sie sich zuerst, dass dieser Pen das richtige Insulin enthält.


1 Nadel aufsetzen

Setzen Sie die Nadel gerade auf.

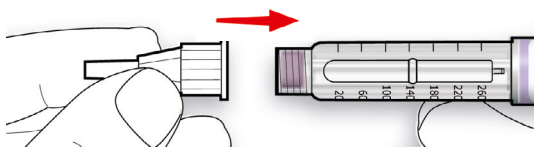


2 Sicherheitstest durchführen

Mit dem Sicherheitstest entfernen Sie Luftblasen und prüfen die ordnungsgemäße Funktion von Pen und Nadel. Wählen Sie eine Dosis von 1 Einheit (2 Einheiten, wenn der Pen neu ist).

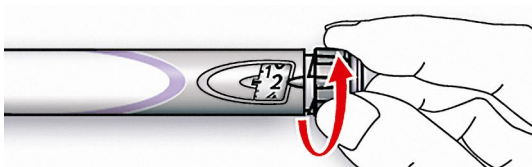


Entfernen Sie die äussere und innere Nadelschutzkappe. Halten Sie den Pen mit der Nadel nach oben. Drücken Sie den Injektionsknopf vollständig ein. An der Nadelspitze muss Insulin austreten.

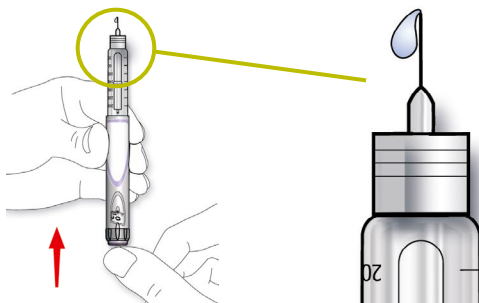

Wenn kein Insulin austritt, müssen Sie den Test so lange wiederholen, bis Insulin austritt. Wenn nach 3 Versuchen immer noch kein Insulin austritt, wechseln Sie die Nadel und wiederholen Sie den Sicherheitstest.

3 Dosis einstellen


(In diesem Beispiel wurde eine Dosis von 30 Einheiten gewählt.)

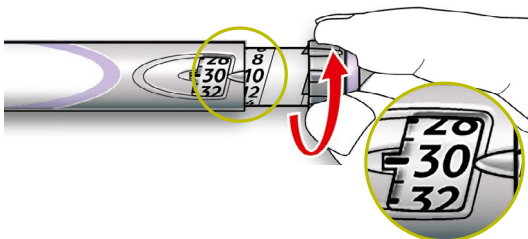

Bei falsch gewählter Dosis können Sie den Dosierknopf einfach wieder zurückdrehen.

4 Dosis injizieren

Stechen Sie die Nadel ein, wie vom medizinischen Fachpersonal empfohlen. Injizieren Sie die Dosis durch vollständiges Eindrücken des Injektionsknopfes. Halten Sie den Injektionsknopf gedrückt und zählen Sie langsam bis 10, bevor Sie die Nadel herausziehen.

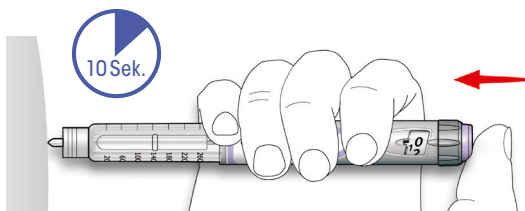

5 Entfernen der Nadel

Setzen Sie die äussere Nadelschutzkappe wieder auf die Nadel und schrauben Sie die Nadel mit der Nadelschutzkappe vom Pen. Entsorgen Sie die Nadel vorschriftsgemäss nach den Empfehlungen Ihres Arztes, indem Sie einen dafür vorgesehenen Sammelbehälter verwenden. Setzen Sie die Penkappe auf und bewahren Sie den Pen sicher auf.

Dies ist eine verkürzte Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie auch die ausführliche Gebrauchsinformation, die jeder SoloSTAR®-Packung beiliegt.

Insuline im SoloSTAR®

Der Lantus® SoloSTAR® ist grau und hat einen violetten Injektionsknopf.

Der Apidra® SoloSTAR® ist blau und hat einen dunkelblauen Injektionsknopf.

AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

1 Vor dem Gebrauch

- ▶ SoloSTAR® bis zum Gebrauch im Kühlschrank lagern.
- ▶ Nicht einfrieren. Durch Einfrieren wird das Insulin geschädigt.
- ▶ Vor dem ersten Gebrauch SoloSTAR® aus dem Kühlschrank nehmen und 1 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur lagern.

2 Während des Gebrauchs

- ▶ Nachdem Sie einen SoloSTAR® aus dem Kühlschrank genommen haben, kann er bis zu 28 Tage verwendet werden. Danach muss der Pen weggeworfen werden (selbst wenn er noch Insulin enthält).
- ▶ Während dieser Zeit sollten Sie den Lantus® SoloSTAR® bei Temperaturen bis zu 30° C und den Apidra® SoloSTAR® bis zu 25° C aufbewahren.
- ▶ Vor Überhitzung schützen und lichtgeschützt aufbewahren (z. B. nicht auf der Fensterbank oder im Auto ablegen).
- ▶ SoloSTAR® nach dem – auf dem Penetikett oder der Verpackung aufgedruckten – Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

3 Für den Fall, dass Ihr SoloSTAR® verloren geht, halten Sie immer einen Ersatzpen bereit.