

## Les insulines dans SoloSTAR®

Le Lantus® SoloSTAR® est gris et a un bouton d'injection violet.

L'Apidra® SoloSTAR® est bleu et a un bouton d'injection bleu foncé.

## INSTRUCTIONS POUR LA CONSERVATION

### 1 Avant utilisation

- ▶ Conservez vos stylos SoloSTAR® au réfrigérateur avant la première utilisation.
- ▶ Ne les congelez pas, ceci détériorerait l'insuline.
- ▶ Retirez votre stylo SoloSTAR® du réfrigérateur 1 à 2 heures avant la première utilisation, afin qu'il revienne à température ambiante.

### 2 En cours d'utilisation

- ▶ Une fois que vous avez sorti votre stylo SoloSTAR® du réfrigérateur, vous pouvez l'utiliser pendant 28 jours.
- ▶ Durant cette période, vous devez conserver le Lantus® SoloSTAR à une température allant jusqu'à 30°C et l'Apidra® SoloSTAR® jusqu'à 25°C.
- ▶ Ne le laissez pas dans un endroit surchauffé, par exemple sur le rebord d'une fenêtre, dans une voiture au soleil. Conservez-le à l'abri de la lumière.
- ▶ N'utilisez pas votre stylo SoloSTAR® après la date de péremption figurant sur l'étiquette du stylo ou sur la boîte.

### 3 Disposez toujours d'un stylo SoloSTAR® de rechange au cas où votre stylo SoloSTAR® serait égaré ou endommagé.

## Nos services pour les personnes diabétiques

L'offre globale de Sanofi repose sur de hauts standards de qualité et sur une longue expérience dans la prise en charge du diabète.

En tant que partenaire de santé, nous vous proposons un service compétent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le diabète et nos produits.




## Guide d'utilisation

Cette brochure est un guide d'utilisation simplifié des stylos Lantus® et Apidra®, elle ne doit être remise aux patients qu'en lien avec une prescription de Lantus® ou Apidra®.

MAT-CH-2001377-3.0-11/2022

# A la découverte de SoloSTAR®

SoloSTAR® est un stylo injecteur d'insuline jetable. Vous pouvez sélectionner des doses de 1 à 80 unités, par paliers de 1 unité.

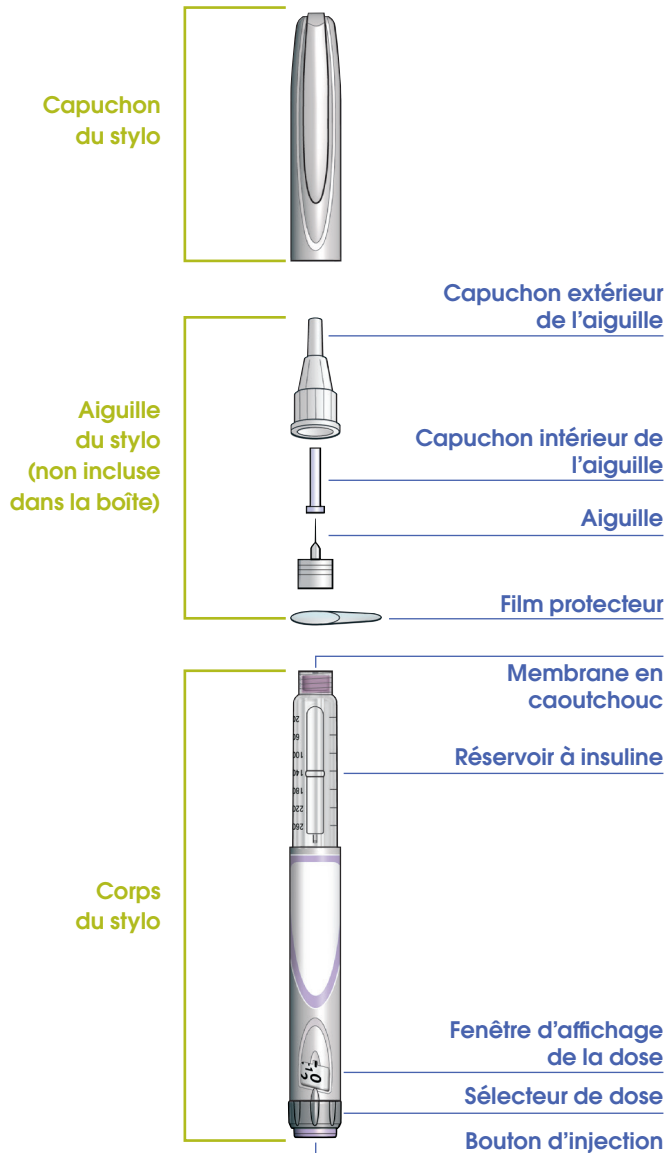


Réservoir à insuline non échangeable



Assurez-vous tout d'abord que ce stylo contient la bonne insuline.


## 1 Fixez une nouvelle aiguille

Maintenez l'aiguille droite pendant la fixation.

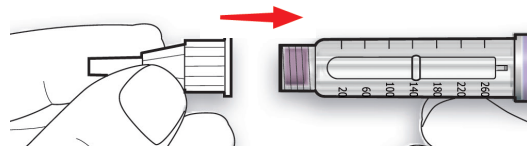


## 2 Effectuez un test de sécurité

Ce test vous permet d'éliminer les bulles d'air et de vous assurer que le stylo et l'aiguille fonctionnent correctement. Sélectionnez une dose d'une unité (deux unités si le stylo est nouveau).

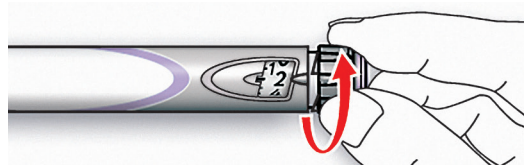


Retirez le capuchon extérieur de l'aiguille. Retirez le capuchon intérieur de l'aiguille et jetez-le. Tenez le stylo avec l'aiguille pointée vers le haut. Appuyez à fond sur le bouton d'injection et vérifiez que de l'insuline sort de l'extrémité de l'aiguille.

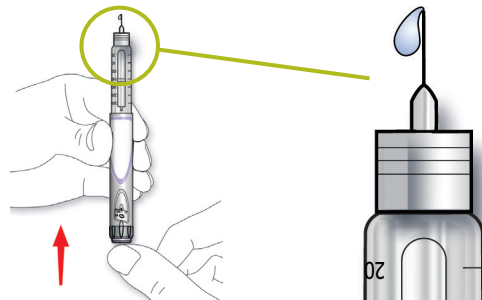

Si l'insuline n'apparaît pas, vous devez répéter le test jusqu'à ce que l'insuline apparaisse. Si l'insuline n'apparaît pas après 3 essais, changez d'aiguille et réessayez.

## 3 Réglez votre dose


(Dans cet exemple, 30 unités sont sélectionnées.)

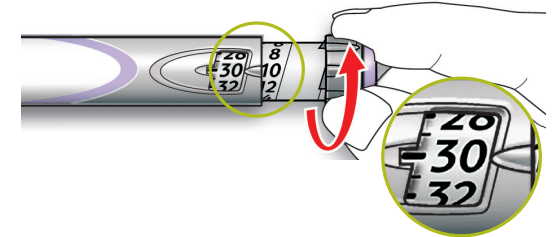

Pour corriger un dosage il suffit de tourner le sélecteur de dose en arrière.

## 4 Injectez votre dose

Introduisez l'aiguille dans la peau en utilisant la méthode d'injection recommandée par votre professionnel de santé. Appuyez à fond sur le bouton d'injection. Maintenez le bouton d'injection enfoncé et comptez lentement jusqu'à 10. Puis retirez l'aiguille.

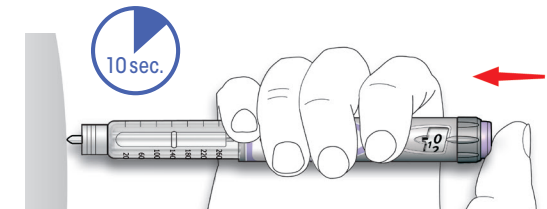

## 5 Enlevez l'aiguille

Remplacez uniquement le capuchon extérieur sur l'aiguille et tenez-le pour dévisser l'aiguille du stylo. Jeter l'aiguille comme prescrit selon les recommandations de votre médecin en utilisant un conteneur de collecte prévu à cet effet. Remplacez le capuchon du stylo et conservez le stylo jusqu'à la prochaine injection.

Cette brochure est un guide simplifié d'utilisation. Lisez aussi les instructions d'utilisation mentionnées dans la notice avant d'utiliser votre stylo SoloSTAR®.